

Quick & Clear II

Procedimiento para la Prueba

1 Retire el dispositivo de prueba de la bolsa sellada y colóquela sobre una superficie plana y seca.

Si los especímenes están refrigerados, deben ser llevados a la temperatura ambiental antes de la prueba.

2 Dispense 3 gotas (aprox. 0.12ml) de la muestra de orina en el hueco o pozo pequeño.


Utilice el gotero en la posición vertical para evitar las burbujas de aire. Espere a que aparezcan las líneas de color.

3 Lea los resultados después de tres Minutos.

Algunos resultados positivos se pueden observar en 60 segundos o menos dependiendo de la concentración de GCH. Las muestras que contengan niveles de gonadotropina coriónica humana (GCH) por debajo de 20 mIU/mL pueden mostrar desarrollo de color con el tiempo, por lo tanto, no lea los resultados después de 10 minutos.



Interpretación de los resultados de la prueba

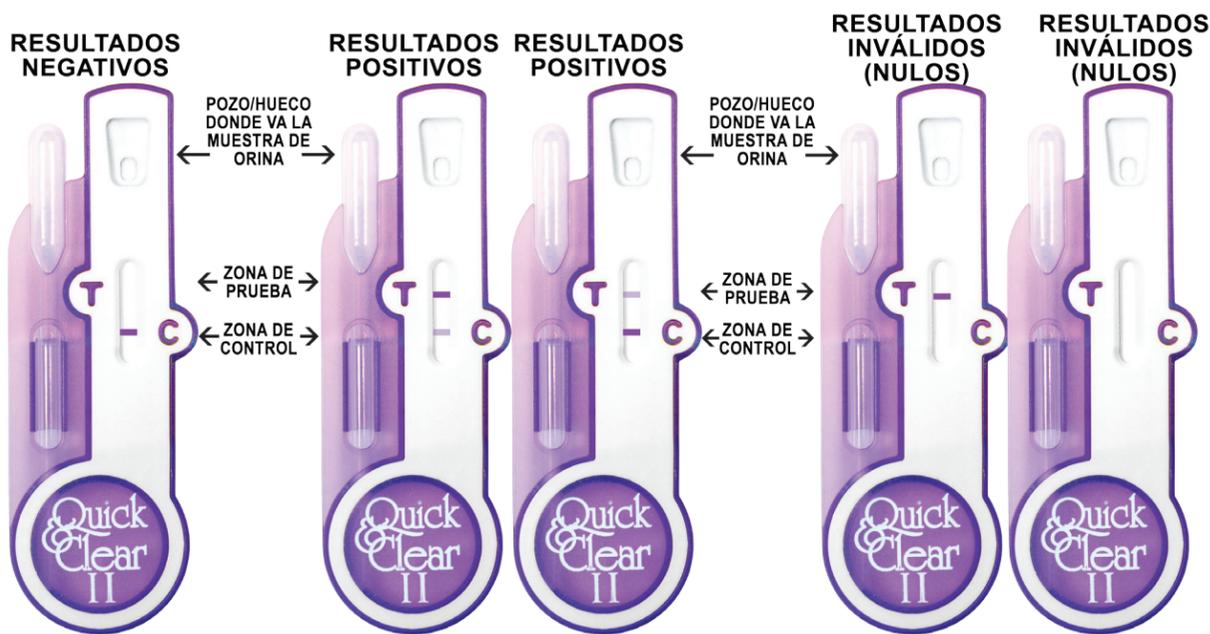

RESULTADOS NEGATIVOS - La prueba es negativa si solamente una línea de color aparece en la Zona de Control. Esto indica la ausencia de niveles detectables de GCH.

RESULTADOS POSITIVOS - La prueba es positiva si aparecen dos líneas de color. Una línea de color aparecerá en la Zona de Prueba y la otra en la zona de Control. Esto indica que el espécimen contiene

niveles detectables de GCH. Cualquier línea de color en la Zona de Prueba debe considerarse positiva. Especímenes que contengan niveles de HCG debajo de 20 mIU/mL puede desarrollar color al pasar del tiempo. La línea de color en la Zona de Control puede ser de color más claro o más oscura que la línea en la Zona de Prueba.

RESULTADOS NO VÁLIDOS - La prueba es inválida si una línea de color no aparece en la Zona de Control, aún si la línea de color aparece en la Zona de Prueba. Si esto ocurre, añada 2 gotas adicionales de la muestra de orina y espere 3 minutos. Si una línea coloreada todavía no aparece en la Zona de Control, la prueba es inválida y debería ser repetida con un nuevo dispositivo de prueba.